

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Предупреждение

1. Персонал по установке и вводу в эксплуатацию должен пройти соответствующее обучение и должен полностью прочитать и понять инструкции по использованию оборудования, инструкции по установке и меры предосторожности перед установкой;
2. Это руководство по установке предназначено только для справки и не может заменить необходимое обучение установке и вводу в эксплуатацию;
3. Пожалуйста, обратите внимание на защиту оборудования во время установки и отладки, чтобы избежать повреждения конструкции оборудования;
4. Если во время установки возникнут какие-либо ненормальные явления, пожалуйста, своевременно свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания производителя.

Схема установки потолочного крепления:


(потолок)


Шаг 1: Используйте распорные винты M12X100, чтобы установить фланец на потолке и затянуть винты.

Шаг 2: Соедините потолочную колонну с фланцем болтами с шестигранной головкой M12X45.

Шаг 3: Болты с шестигранной головкой M10X30 используются для регулировки уровня потолочной колонны.

Шаг 4: Накройте потолочную колонну потолочной крышкой и закрепите её.

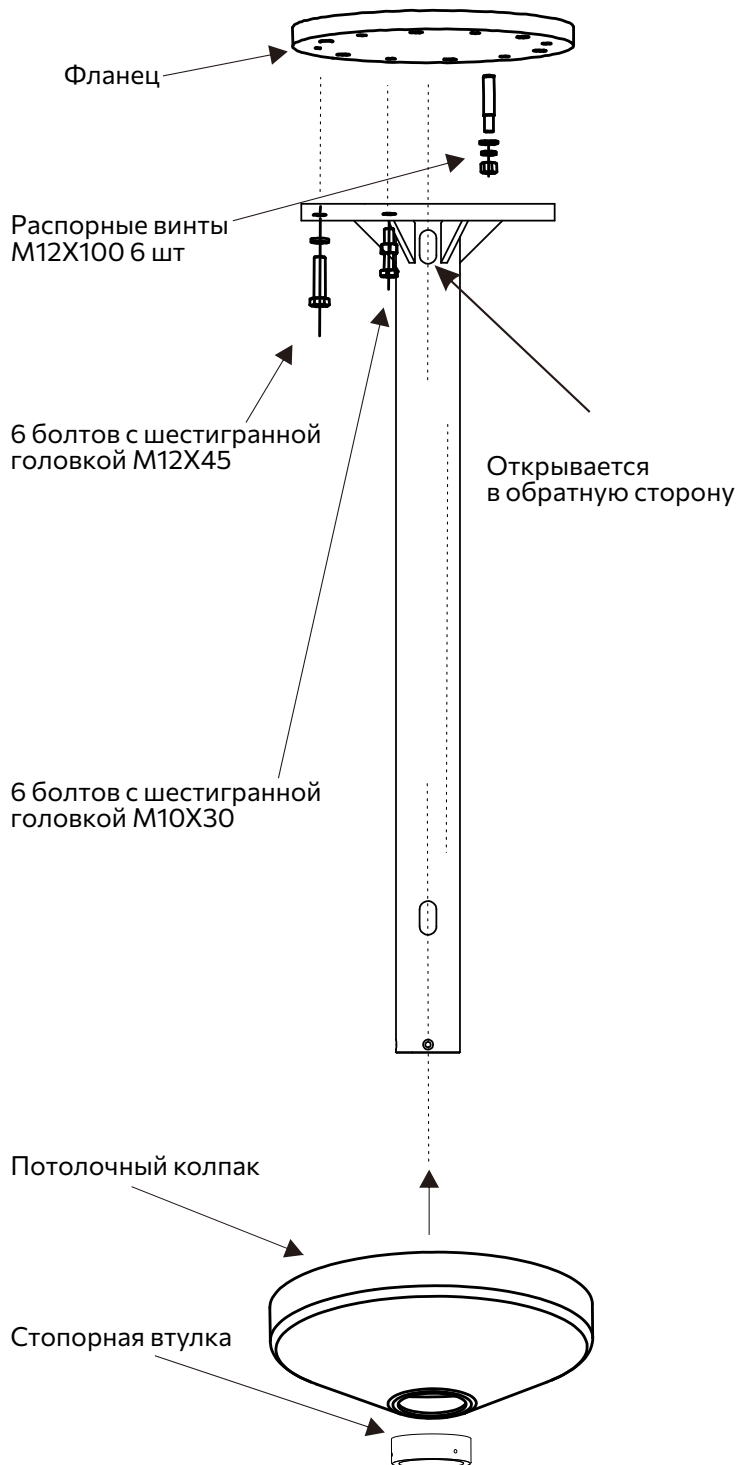

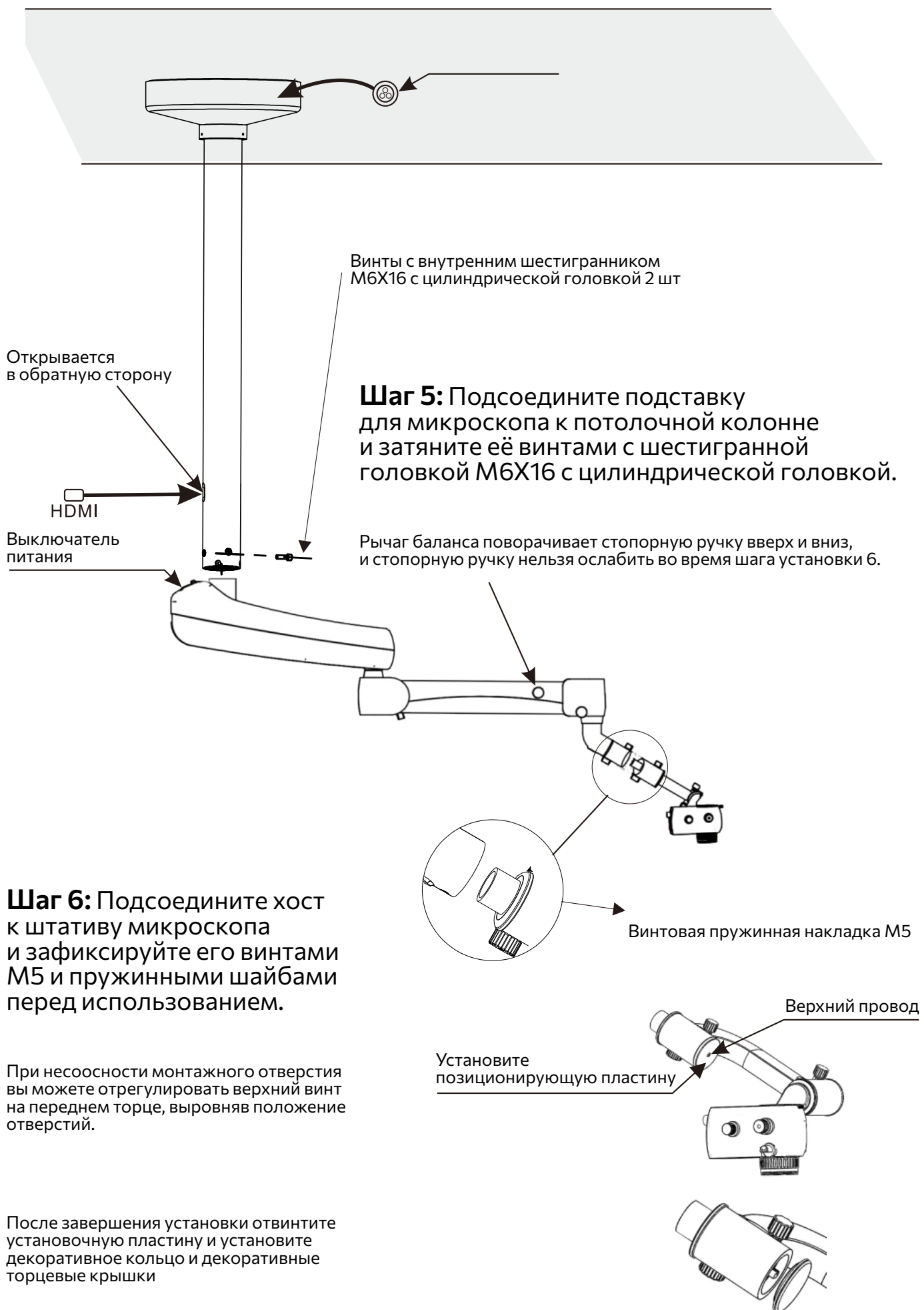

Винты с внутренним шестигранником M6X16 с цилиндрической головкой 2 шт

Шаг 5: Подсоедините подставку для микроскопа к потолочной колонне и затяните её винтами с шестигранной головкой M6X16 с цилиндрической головкой.

Рычаг баланса поворачивает стопорную ручку вверх и вниз, и стопорную ручку нельзя ослабить во время шага установки 6.

Открывается в обратную сторону

HDMI

Выключатель питания

Шаг 6: Подсоедините хост к штативу микроскопа и зафиксируйте его винтами M5 и пружинными шайбами перед использованием.

При несоосности монтажного отверстия вы можете отрегулировать верхний винт на переднем торце, выровняв положение отверстий.



После завершения установки отвинтите установочную пластину и установите декоративное кольцо и декоративные торцевые крышки

Винтовая пружинная накладка M5

Верхний провод

Установите позиционирующую пластину

Шаг 7: Вставьте корпус бинокулярной линзы в соединение «ласточкин хвост» и затяните винты

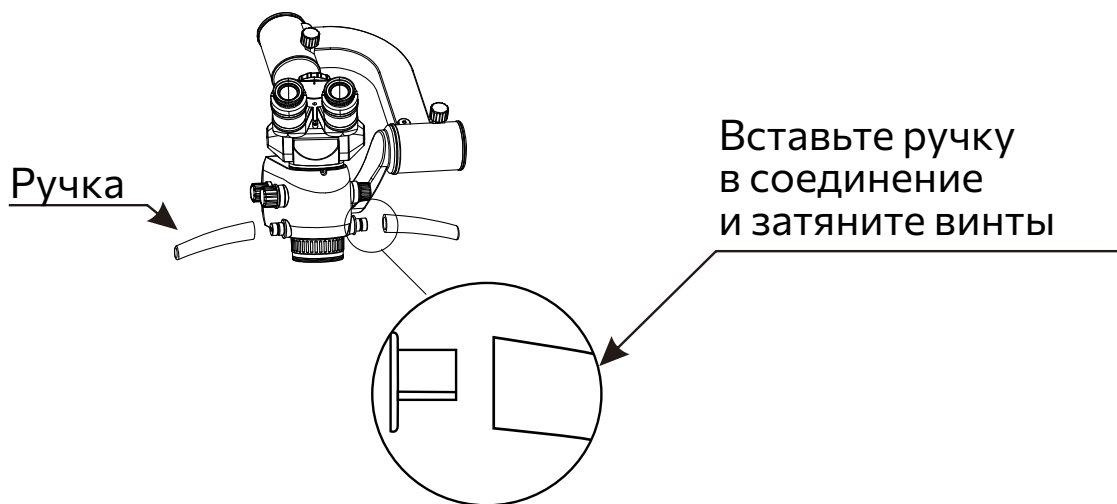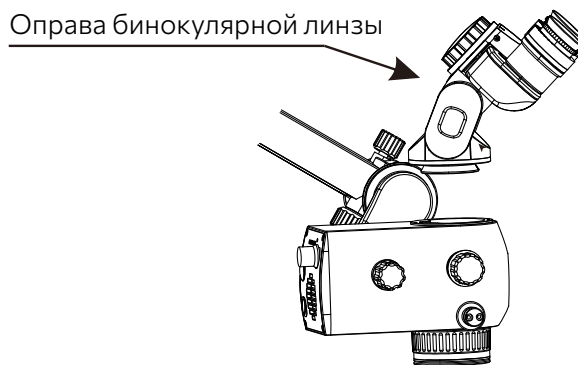

Подключите шнур питания, чтобы завершить установку

Пожалуйста, отладьте

1. Проверьте, нормально ли вращается каждый фиксирующий маховик и вращающиеся детали, и можно ли их эффективно заблокировать.
2. Переверните каждый выключатель питания в выключенное состояние, включите питание и снова включите выключатель питания.
3. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы проверить, правильно ли работает каждая функция.

Примечание. Если операционный микроскоп оснащён камерой, монитором и другими аксессуарами, см. «Инструкцию по установке камеры» для получения инструкций по установке.